


N-TORSA

～針には触れずヒューバー針の安全な抜針・廃棄をサポートする抜針器～

ヒューバー針・抜針器

Huber needle safety remover

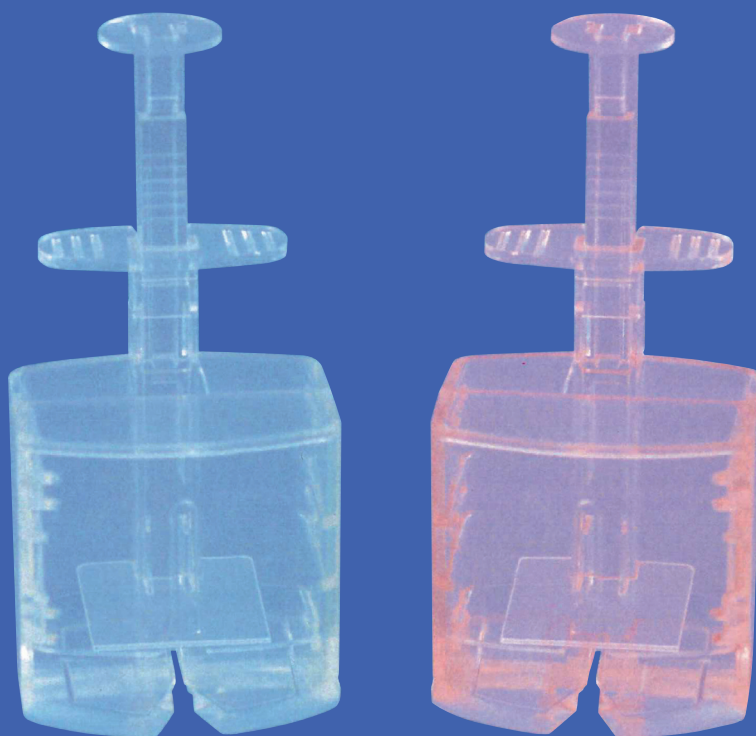

安全な
抜針をサポート

針刺し
事故防止


片手で
操作可能

抜針後
そのまま廃棄


ヒューバー針・抜針器

Huber needle safety remover


使用方法

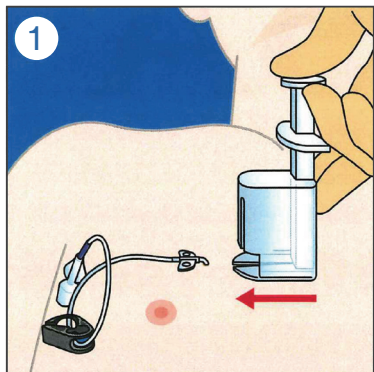


①リフト部の底辺が最下部にあるか必ず確認し、針前方側より体表に沿って本体をスライドして下さい。

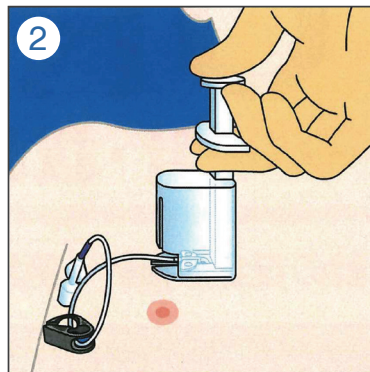


②針全体が収納されたのを必ず確認し、リフト部を垂直に引き上げて下さい。

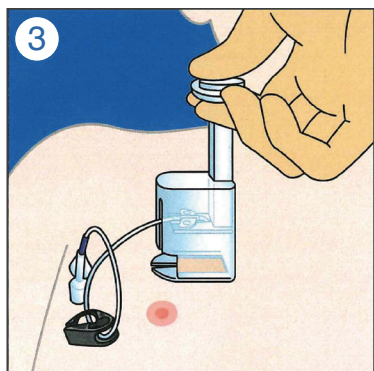

③『パチッ』と音が鳴るまで最上部まで確実に引き上げて下さい。

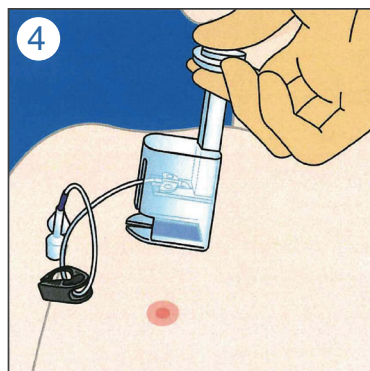

④抜針後は針が収納された状態のまま廃棄して下さい。

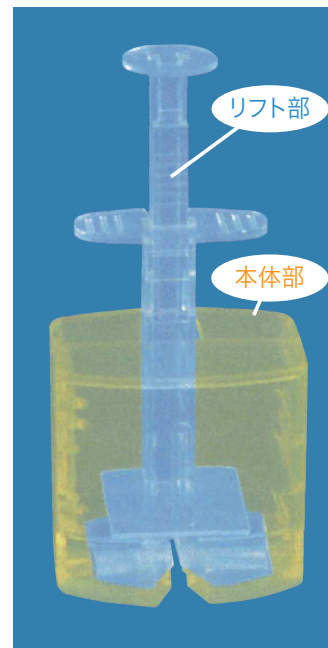

型番	品名	入数
HNSR-100C	ヒューバー針・抜針器 クリア	10個/箱
HNSR-100CP	ヒューバー針・抜針器 クリアピンク	10個/箱

必要な方はこちらまで



<http://www.techno-global.co.jp>

注 意

※ディスプレイの為、使用は1回限りです。

※商品本体及び個包装の袋等に破損が有る場合は使用をしないで下さい。

※使用時はリフト部を最下部まで下げて使用して下さい。

※抜針後はリフト部を最上部まで引き上げて下さい。
(パチッと音がして動かなくなるまで。)

※使用後は針を抜かずに必ず商品ごと廃棄して下さい。

発売元・製造元

 テクノグローバル株式会社

〒581-0055 大阪府八尾市跡部南の町1-1-37

TEL 072-993-7935
FAX 072-993-7936

MAIL info@techno-global.co.jp
URL <http://www.techno-global.co.jp>

23.12.14-R1